

Dokumentbeteckning Mobilt positioneringslarm GPS		
Ansvarig funktion Objektledare VSOA	Rutinansvarig Välfärdsteknikteamet	Upprättad datum 2016-08-03
Gäller för Utförare hemtjänst/ Säbo	Remiss/samråd Ej aktuellt	Reviderad datum 2024-04-01

Information: Personliga larminställningar för mobilt trygghetslarm- GPS

Vilka inställningar/ funktioner som GPS-larmet skall ha beslutas vid utprovningen, som utförs av legitimerad arbetsterapeut från demenscenter på Linköpings kommun i samråd med brukare/ närstående/ hemtjänst. Arbetsterapeut skickar färdig utprovning till välfärdsteknikteamet som ansvarar för att registrera överenskomna inställningar/ funktioner samt installationen av GPS-larmet. I samband med installationen lämnas erforderlig information till berörda.

Funktioner som kan aktiveras:

Aktiv larmknapp:

När brukaren trycker på larmknappen på klockan skickas ett larm till Careium larmcentral. Brukaren kan då kommunicera med larmcentralen via GPS-klockan. Aktiv larmknapp går ej att ha aktiverad tillsammans med inställningen trygg zon.

Ringa till GPS-klocka:

Innebär att det går att ringa till GPS-klockan och samtala med brukaren. Brukaren behöver ej göra något aktivt på klockan för att svara. Endast förprogrammerade telefonnummer är behöriga att kunna ringa till GPS-klockan. Överenskommelse sker vid utprovningen. GPS-klockans telefonnummer lämnas ut av välfärdsteknikteamet vid installationen. Telefonnummer ska förvaras så att obehöriga inte kommer åt det.

Hemmazon:

Innebär att GPS-klockan är uppkopplad via bluetooth till laddstationen. Förflyttar sig brukaren för långt ifrån laddstationen, tappar GPS-larmet kopplingen till bluetooth, då går ett larm till omsorgspersonal via Careium larmcentral.

Trygg zon:

Brukaren har en uppritad karta/zon, ett "virtuellt staket". När brukaren rör sig utanför denna karta/zon går ett larm till omsorgspersonal via Careium larmcentral.

Personalen får den senaste angivna positionen från Careium larmcentral. Se brukarens genomförandeplan för hur inkommande larm ska hanteras.

Omsorgspersonalen ansvarar för att möta upp brukaren där den befinner sig, för att kunna ge brukaren ett personligt bemötande och underlätta att hjälpa brukaren hem.

Kom ihåg att det går att ringa tillbaka till larmcentralen och begära ut ny position om personen inte kan lokaliseras efter första positionen. Ange brukarens namn, personnummer samt behörighetskod för att kunna få senaste positionen. Telefonnummer till Careium larmcentral: 0706-00 61 46.

Behörighetskod för GPS-klockan lämnas ut av välfärdsteknikteamet vid installationen.

Behörighetskoden ska förvaras så att obehöriga inte kommer åt den.

Om omvårdnadspersonal bedömer att de inte har möjlighet att möta upp brukaren, till exempel om brukare befinner sig långt bort, sitter på ett tåg, är långt ut i skogen, är på annan ort, då kontaktas polis.

Aktiv larmknapp går ej att ha aktiverad tillsammans med inställningen trygg zon

Söka/ spåra:

Om brukaren saknas och positionen ska begäras ut, ring upp Careium larmcentral, ange brukarens namn, personnummer samt behörighetskod för att kunna få senaste positionen.

Telefonnummer till Careium larmcentral: 0706-00 61 46.

Behörighetskod för GPS-klockan lämnas ut av välfärdsteknikteamet vid installationen till de som ska ha behörighet till koden.

Behörighetskoden ska förvaras så att obehöriga inte kommer åt den.

Ändringslogg

2024-04-01: Reviderad ansvarsrubrik utifrån ny förvaltningsorganisation.

2024-04-01: Ändrad utifrån ny rutinmall

2024-04-01: Uppdaterad utifrån reviderad rubriksättning